

Plán první pomoci při zasažení očí



Vyjměte lahvičku z boxu.



Otočte oční miskou, až povolí ochranný uzávěr.



Zakloňte hlavu a proveďte výplach oka nebo...



... předkloňte hlavu a proveďte výplach oka.

Doporučené vyplachovací roztoky podle účinku nečistot a škodlivých látek

Zasažení očí nečistotami a škodlivými látkami	Doporučený vyplachovací roztok	Pokračování ve výplachu až do lékařského ošetření	Doporučený výplach
Cizí tělesa např. prach, piliny, třísky, zrna, kovové špony	Fyziologický roztok 500 ml Číslo výr. 5409 32	Fyziologický roztok 500 ml Číslo výr. 5409 32	Vyplachujte oči fyziologickým roztokem tak dlouho, až cizí tělesa vyplavíte.
Zasažení očí kyselinami	pH neutrální fosfátový roztok 200 ml Číslo výr. 5409 33	Fyziologický roztok 500 ml Číslo výr. 5409 32	Vyplachujte oči pH neutrálním fosfátovým roztokem po dobu 2 minut, až lahvičku vyprázdníte. Ve výplachu pokračujte fyziologickým roztokem až do lékařského ošetření.
Zasažení alkáliemi	pH neutrální fosfátový roztok 200 ml Číslo výr. 5409 33	Fyziologický roztok 500 ml Číslo výr. 5409 32	Vyplachujte oči pH neutrálním fosfátovým roztokem po dobu 2 minut, až lahvičku vyprázdníte. Ve výplachu pokračujte fyziologickým roztokem až do lékařského ošetření.
Jiná zasažení očí např. rozpouštědly a oleji	Fyziologický roztok 500 ml Číslo výr. 5409 32	Fyziologický roztok 500 ml Číslo výr. 5409 32	Vyplachujte oči fyziologickým roztokem tak dlouho, dokud nezmizí nepříjemný pocit. Ve výplachu pokračujte až do lékařského ošetření.

Upozornění a zákony k ochraně zraku

Důležité!

Ve všech případech by se oko mělo vyplachovat měkkým a rovnoměrným proudem. Lahvičku stlačujte během vyplachování jen lehce! Sterilní roztok pro výplach očí k jednorázovému použití. Při opakovaném použití hrozí nebezpečí infekce

Zasažení očí kyselinami a alkáliemi (žiravinami)

Při těchto úrazech začíná poleptání již v okamžiku, kdy se látka dostane do kontaktu s okem. Pro tento druh poranění doporučujeme použití fosfátového pufrového roztoku.

Trvanlivost

Neotevřené sterilní roztoky pro výplach očí jsou použitelné po dobu tří let. Není nutná žádná údržba ani čištění lahviček. Datum trvanlivosti je uvedeno na etiketě.

Německý Zákon o bezpečnosti práce § 3

Zaměstnavatel je povinen učinit opatření k bezpečnosti práce a dát k dispozici vhodné prostředky pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku. Zaměstnanci mají povinnost používat poskytnutou osobní ochrannou výbavu.

Německá Vyhláška o pracovištích § 39

V závislosti na typu nebezpečí (např. při manipulaci s kyselinami a louhy) musejí být na pracovišti k dispozici lahve pro výplach očí.

Zasažení cizími tělesy

Čas hraje důležitou roli rovněž u mechanických poranění, způsobených např. kovovými šponami nebo dřevěnými třískami, nečistotami nebo prachem a také jinými cizími tělesy. V takovém případě může okamžitý výplach zabránit tomu, aby cizí tělesa v oku uvízla a způsobila jeho těžké poškození. Tady je náš fyziologický roztok chloridu sodného (0,9 %) tou správnou volbou.

Přeprava nebezpečného nákladu

Spediční firma je povinna vybavit každé vozidlo přepravující nebezpečný náklad autolékárničkou podle DIN 13164, která je rozšířena o lahvičku pro výplach očí, ochranné brýle aj.

DIN EN 15154-4

Tato norma upravuje mj. požadavky na oční sprchy bez připojení na vodu z hlediska jejich výkonu, funkce a informací k použití.